

# Atemphysiotherapiegerät

## “EX1-MEDIC”

### Expiratorischer Atem-Muskeltrainer

Art. Nr. 259.91550



### Atemphysiotherapiegerät "EX1-MEDIC"

Der POWERbreathe **EX1-MEDIC** ist ein Atemtrainer speziell für Personen mit Atemwegserkrankungen (z. B. COPD) zur therapeutischen Stärkung und Aufbau der Atemmuskulatur mit Hilfe von expiratorischem Muskeltraining (EMT).

- expiratorischer Atemtrainer
- stufenlos einstellbarer Trainingswiderstand
- kalibrierter Widerstand
- extrem leichter Widerstand im Level 0

Mit dem POWERbreathe **EX1-MEDIC** werden Ihre expiratorischen Atemmuskeln durch eine Druckgrenzwertbelastung beim Ausatmen trainiert.

POWERbreathe nutzt die Technik des Widerstandstrainings, um die Atemmuskulatur zu trainieren. Der Widerstand bewirkt, dass sich die Atemmuskeln beim Ausatmen stärker anstrengen müssen. Die Muskulatur wird aktiviert, Kraft und Ausdauer werden aufgebaut.

Der POWERbreathe **EX1-MEDIC** ist ein Ausatemtrainer, der mit einer kalibrierten Widerstandsfeder ausgestattet ist. Der Widerstand ist über ein externes Stellrad (Skala von 1-10) so einstellbar, dass Sie diesen nach und nach entsprechend der Stärke Ihrer Atemmuskulatur, anpassen können.

Mit wenigen Minuten Training pro Tag können Sie innerhalb kürzester Zeit eine signifikante Verbesserung Ihrer Atemkondition erzielen und Ihr körperliches Wohlbefinden und Ihre körperliche Leistung, wesentlich steigern.



Einwegfilter / Adapter nicht im Set enthalten / Sonderzubehör

## Lasteinstellbereich

---

Modell	Last (cmH <sub>2</sub> O)										
	Lasteinstellung										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EX1-Medic	10	17	24	31	38	45	52	59	66	73	80

## Haftungsausschluss

---

POWERbreathe Geräte sind keine Spielzeuge. Dieses Produkt ist allein für Atemübungen bestimmt.

Von jeglicher anderen Verwendung wird abgeraten. Wenden Sie sich bezüglich von Fragen zu Erkrankungen immer an Ihren Arzt oder Gesundheitsdienstleister. Dieses Produkt dient nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Individuelle Ergebnisse können variieren. Es werden keinerlei Ansprüche bezüglich der Anwendung des hierin beschriebenen Produkts oder diesbezüglicher Ergebnisse erhoben.

Vor Gebrauch bitte immer die Gebrauchsanweisung lesen.

Das Material in dieser Gebrauchsanweisung dient nur zu Informationszwecken.

Die POWERbreathe Geräte enthalten Kleinteile und sind für Kinder unter 7 Jahren nicht geeignet. Hinweis: Dieses Produkt ist aus hygienischen Gründen versiegelt und kann nicht zurückgegeben werden, wenn das Siegel beschädigt worden ist.

POWERbreathe International Ltd gibt bezüglich dieser Gebrauchsanweisung oder der hierin beschriebenen Produkte keinerlei Erklärungen oder Garantien ab. POWERbreathe International Ltd haftet nicht für unmittelbare, mittelbare, versehentliche, Folge- oder Sonderschäden, die durch eine Zweckentfremdung oder einen nicht sachgemäßen Gebrauch dieses Materials oder der hierin beschriebenen Produkte entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.

POWERbreathe ist ein ein patentiertes und designrechtlich geschütztes Produkt. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten unterliegen einem Programm der ständigen Weiterentwicklung durch den Hersteller und können sich unangekündigt ändern.

Das POWERbreathe-Logo ist eine eingetragene Marke der POWERbreathe Holdings Ltd.

Alle POWERbreathe-Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der POWERbreathe Holdings Ltd.

Alle Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

POWERbreathe Holdings Ltd. E & OE © 01/2023